

# A CHAQUE SAIGNEMENT, SON COALGAN®

## Coalgan® POUDRE

Pour les :

- Éraflures
- Coupures de rasoir
- Plaies du cuir chevelu
- Erythèmes fessiers
- Zones de plis



## Coalgan® COMPRESSE

Pour les saignements :

- De nez
- Buccaux
- Des plaies superficielles
- Des zones très vascularisées (arcades sourcilières,...)



## Coalgan® MÈCHE

Pour les saignements abondants :

- De nez
- Buccaux
- Cutanés



Coalgan®  
ADHÉSIF  
www.coalgan.com



Arrête  
le saignement

**COALGAN®**,  
naturellement

LABORATOIRES  
**BROTHIER**

## COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan® ADHÉSIF, stérile, est constitué d'une compresse bio-active de fibres d'alginate de calcium\* sur un support adhésif hypoallergénique.

\*Issu d'algues marines.

> **Arrête rapidement le saignement** : l'alginate de calcium favorise l'agrégation des plaquettes et diminue le temps de coagulation.

> **Favorise la cicatrisation** : l'alginate de calcium stimule les cellules clés de la cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les bactéries. Les risques de complications dermatologiques sont ainsi réduits.

> **Apaise la sensation de douleur** : au contact de la plaie, les fibres d'alginate de calcium se gélifient pour permettre un retrait sans douleur.

## INDICATIONS

Arrêt des saignements des blessures superficielles :

- Coupures
- Ampoules ouvertes
- Petites plaies

Coalgan® ADHÉSIF s'utilise chez l'enfant, l'adulte et la femme enceinte et est recommandé chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux (Rendu-Osler, von Willebrand, Hémophilie) ou acquis (sous antiagrégants plaquettaires, anti-vitamine K ou héparines). Un saignement persistant nécessite un avis médical.

## MODE D'UTILISATION

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%).

Appliquer Coalgan® ADHÉSIF directement sur la blessure en exerçant une légère pression pendant quelques secondes.



Au retrait, ne pas essayer de retirer les fibres qui subsistent dans la plaie ou dans la croûte, elles disparaîtront d'elles-mêmes avec cette dernière.

## CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune contre-indication connue à ce jour. Coalgan® ADHÉSIF contient des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

## INTERACTIONS

Coalgan® ADHÉSIF ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0,9% avant d'appliquer Coalgan® ADHÉSIF.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance.

Pour plus d'informations : [www.stop-saignements.com](http://www.stop-saignements.com)



Les Laboratoires Brothier

41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex - France

[info@brothier.com](mailto:info@brothier.com) - [www.brothier.com](http://www.brothier.com)

Site de production :

ZA des Roches - 49590 Fontevraud l'Abbaye - France

