

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes **PACKAGE INSERT**

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

DESCRIPTION :

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes est un produit hydratant à base lipidique pour le traitement des yeux secs. **SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes** hydrate la surface oculaire, stabilise et complète la couche lipidique du film lacrymal et diminue l'évaporation excessive des larmes. **SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes** procure un soulagement prolongé des symptômes des yeux secs, comme la brûlure et l'irritation.

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes est un produit stérile contenant du propylène glycol, de l'hydroxypropyl guar, de l'huile minérale, du dimyristoyl phosphatidylglycérol, du polyoxyl 40 stéarate, du tristéarate de sorbitane, de l'acide borique, du sorbitol, de l'édetate disodique et du POLYQUAD® (polyquaternium-1) à 0,001% comme conservateur.

UTILISATIONS (Indications) :

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes est utilisé pour traiter les yeux secs et procure un soulagement temporaire de la brûlure et l'irritation provoquées par la sécheresse oculaire.

CONTRE-INDICATIONS (Dans quels cas ne pas utiliser ce produit) :

Les personnes allergiques à l'un des composants de **SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes** ne doivent pas utiliser ce produit.


INSTRUCTIONS :

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes peut être utilisé autant de fois que nécessaire pendant la journée. Peut être utilisé pour traiter les yeux secs résultant de l'usage de lentilles de contact, en instillant des gouttes avant et après le port de lentilles. Bien agiter avant l'emploi. Mettre les gouttes dans l'œil puis cligner des yeux.

MISES EN GARDE :

Pour bien utiliser le produit, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice. Si vous ressentez une gêne oculaire persistante, un larmoiement excessif, des modifications de la vision ou une rougeur de l'œil, consultez votre spécialiste car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS :

- Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
- Replacer le bouchon après chaque utilisation.
- A conserver à température ambiante.
- Garder le flacon bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 
- Jeter toute solution restante 6 mois après la première ouverture.
- Tenir hors de la portée des enfants.

PRESENTATION :

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes, stérilisé par un processus associant vapeur et filtration, est disponible en flacons plastique de 10 ml



DISTRIBUTEUR pour la Belgique et le Luxembourg :

ALCON NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde, Belgique



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Royaume-Uni



© 2012 Novartis

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes
CARTON LABEL

Alcon® (logo)
SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes

Formule Réparatrice <violator bar>

Protection Totale <violator bar – option 1>

Avec le Système LIPITECH™ <violator bar – option 2>

<Clinical Strength (Not translated. Alternative = option 1)>

Traitement Intensif

Pour le soulagement temporaire de la brûlure et l'irritation provoquées par la sécheresse oculaire.



10 ml (or 3 ml sample version)

FERMETURE DE SECURITE : Ne pas utiliser si la fermeture de sécurité est abîmée ou

absente. Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou abîmé.



Pour le mode d'emploi complet ainsi que d'importantes informations relatives à la sécurité d'emploi du produit, se reporter à la notice.



A conserver à température ambiante.

Bien agiter avant l'emploi.

A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.



Jeter toute solution restante 6 mois après la première ouverture.

COMPOSITION :

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes est un produit stérile contenant du propylène glycol, de l'hydroxypropyl guar, de l'huile minérale, du dimyristoyl phosphatidylglycérol, du polyoxyl 40 stéarate, du tristéarate de sorbitane, de l'acide borique, du sorbitol, de l'édétate disodique et du POLYQUAD® (polyquaternium-1) à 0,001% comme conservateur.

LOT



DISTRIBUTEUR pour la Belgique et le Luxembourg:

ALCON NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde, Belgique



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

CNK : 2879-609


CE 0123

© 2012 Novartis

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes
BOTTLE LABEL - multilingual

Alcon® (logo)

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes

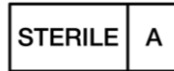

10 ml (or 3 ml sample version)



A conserver à température ambiante.

Contient du POLYQUAD® (polyquaternium-1) à 0,001% comme conservateur.



DISTRIBUTEUR pour la Belgique et le Luxembourg :

Alcon NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde, Belgique



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

CE 0123

© 2012 Novartis

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes
BOTTLE LABEL - 5 ml (or other sizes)

Alcon® (logo)

SYSTANE® BALANCE Gouttes Oculaires Hydratantes



10 ml (or 3 ml sample version)



A conserver à température ambiante.

Jeter toute solution restante 6 mois après la première ouverture.

Ne pas utiliser si la fermeture de sécurité est abîmée ou absente.



Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.

Garder le flacon bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Bien agiter avant l'emploi.

Contient du POLYQUAD® (polyquaternium-1) à 0,001% comme conservateur.

LOT



DISTRIBUTEUR pour la Belgique et le Luxembourg:

Alcon NV
Medialaan 36
1800 Vilvoorde, Belgique



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

CE 0123

© 2012 Novartis