

Flect'EXPERT

PATCH DOUBLE ACTION FROID/CHAUD



Flect'EXPERT

**PATCH DOUBLE
ACTION À EFFET
FROID/CHAUD**

Menthol et
Gaultherie



Laboratoires
Genevrier
LABORATOIRES DE PHARMACIE

FI/155 1224 Ed. II/10.18



Flect'Expert est un Patch Double Action avec un effet froid/chaud basé sur la technologie Hydrogel. Grâce à cette technologie, le patch procure, dès l'application, un effet frais qui soulage simultanément la zone traitée: sa structure douce et confortable protège la zone douloureuse et la teneur élevée en eau purifiée présente dans l'hydrogel contribue à la maintenir hydratée.

L'action synergique des composants a été étudiée expressément pour produire une confortable chaleur sur la zone douloureuse, après la sensation de fraîcheur initiale.

En outre, la technologie Hydrogel permet un retrait facile et indolore du patch.

Flect'Expert Patch double action contient :

- Du menthol, aux propriétés rafraîchissantes et décongestionnantes, qui contribue au soulagement de la symptomatologie douloureuse ;
- Du VBE (vanillyl-butyl-éther) qui exerce une double action : il potentialise initialement l'effet rafraîchissant du menthol, puis produit une agréable sensation de chaleur sur la peau, soulageant ainsi les tensions musculaires et articulaires ;
- De l'huile de Gaultherie (*Gaultheria procumbens*), connue pour ses propriétés apaisantes.

INDICATIONS

Flect'Expert Patch double action protège les zones du corps affectées par des douleurs rhumatismales et musculaires, des lombalgies ou torticolis et soulage les symptômes douloureux résultant de traumatismes et de contusions, y compris suite aux activités sportives.

PRÉSENTATION

Boîte contenant 5 patchs (10 x 14 cm) emballés dans un sachet refermable.

FORME ET COMPOSITION

Chaque patch contient :

VBE (vanillyl-butyl-éther), menthol, Huile de gaulthérie (dérivé salicylé), gélatine, povidone K90, solution de sorbitol à 70 %, kaolin, dioxyde de titane, propylène glycol, méthylparahydroxybenzoate, propylparahydroxybenzoate, édétate de sodium (EDTA), acide tartrique, carmellose sodique (CMC), glycinate d'aluminium, 1,3-butylène glycol, polysorbate 80, polyacrylate de sodium, eau purifiée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Sortir Flect'Expert Patch double action de l'emballage et enlever le film protecteur. Appliquer le patch sur la zone douloureuse, en le découpant éventuellement pour lui donner la forme et la dimension adéquates. Sur les zones du corps où l'application peut être plus difficile (p.ex. les genoux, coudes, chevilles et poignets), le patch peut éventuellement être maintenu sur la surface à traiter au moyen d'une bande élastique.

Pour enlever le patch, soulever un bord et tirer délicatement.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Utiliser Flect'Expert Patch double action en cas de besoin et laisser le patch en place sur la zone à traiter, jusqu'à disparition de la sensation bénéfique.

La durée de l'effet froid/chaud est subjective, et cet effet se dissipe de toute façon au bout de quelques heures.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser plus d'un patch de Flect'Expert Patch double action par application.

Ne pas utiliser Flect'Expert Patch double action si l'emballage est endommagé.

Le produit doit uniquement être appliqué sur une peau intacte et saine et ne doit pas être porté durant le bain ou la douche. Ne pas appliquer sur les yeux ou autour de ceux-ci, ni sur les muqueuses.

Ne pas utiliser le produit en même temps que d'autres traitements topiques éventuellement appliqués sur la zone à traiter.

En cas de doute au sujet de l'utilisation de Flect'Expert Patch double action, consultez votre médecin.

Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler.

Les patchs contenus dans la boîte de Flect'Expert Patch double action sont destinés à un usage unique et ne peuvent être réutilisés. Une fois utilisé, éliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur.

Tenir hors de portée et de vue des enfants.

CONTRE-INDICATIONS

Flect'Expert Patch double action à effet froid/chaud ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants. Ne pas utiliser sur une peau endommagée, indépendamment du type de lésion.

GROSSESSE : il n'existe aucun lien entre l'utilisation de Flect'Expert Patch double action et la survenue d'effets indésirables pendant la grossesse ou d'éventuelles malformations chez le nouveau-né. Toutefois, l'utilisation de Flect'Expert Patch double action n'est pas recommandée pendant la grossesse, à moins d'une nécessité absolue. Dans ce cas, adressez-vous à votre médecin qui pourra vous conseiller.

INTERACTIONS

À ce jour, aucune interaction entre les composants de Flect'Expert Patch double action à effet froid/chaud et d'autres médicaments n'a été rapportée.

CONSERVATION

Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri de la lumière du soleil et à l'écart de sources de chaleur.



IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Via Martiri di Cefalonia, 2
I - 26900 Lodi
E-mail : info@ibsa.it

Distributeur : Laboratoires Genevrier

280, rue de Goa
ZI Les Trois Moulins
Parc d'Activités de Sophia-Antipolis
06901 Sophia-Antipolis Cedex France

Date de la dernière révision de la notice : **Octobre 2018**



Attention : consulter les précautions d'emploi.



À utiliser avant...



Lot



À usage unique



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Consulter les instructions d'utilisation



Fabricant



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT -> WWW.CONSIGNESDETRI.FR